

PT



PARA REDUZIR OS RISCOS DE CHOQUE ELÉTRICO, INCÊNDIO E FERIMENTOS OU DANOS MATERIAIS, ESTE DISPOSITIVO DEVE SER UTILIZADO DE ACORDO COM OS SEGUINTE AVISOS, ADVERTÊNCIAS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES – INSTRUÇÕES ORIGINAIS

Leia todas as instruções antes de utilizar o Hypervolt 2 Pro.

PERIGO

Para reduzir o risco de choque elétrico:

- Retire sempre este dispositivo da tomada elétrica imediatamente após a sua utilização e antes de o limpar.
- Não apanhe um dispositivo que tenha caído na água. Retire imediatamente da tomada.
- Não utilize quando estiver no banho ou no duche.
- Não coloque nem guarde o dispositivo num local onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou lavatório. Não coloque nem deixe cair dentro de água ou de outro líquido.

AVISO

Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou ferimentos:

- Um dispositivo nunca deve ser deixado sem vigilância enquanto estiver ligado à corrente. Desligue a ficha da tomada quando não estiver a ser utilizado e antes de colocar ou retirar peças.
- Não utilize o aparelho debaixo de uma manta ou almofada. Tal poderá resultar num aquecimento excessivo causando um incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- Este dispositivo pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do dispositivo e tenham compreendido os perigos associados.
- Utilize este dispositivo apenas para a utilização prevista, conforme descrito neste manual. Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Nunca utilize o dispositivo se este tiver um cabo ou ficha danificados, não estiver a funcionar corretamente, tiver caído ou se estiver danificado ou molhado. Devolva o dispositivo a um centro de assistência para que seja examinado e reparado.
- Não transporte este dispositivo segurando no cabo de alimentação nem utilize o cabo como pega.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.
- Nunca utilize o dispositivo com as aberturas de ar bloqueadas. Mantenha as aberturas de ar

livres de algodão, cabelos ou qualquer substância que possa prejudicar o fluxo de ar.

- Nunca deixe cair nem introduza objetos nas aberturas.
- Não utilize em espaços ao ar livre.
- Não utilize em locais onde estejam a ser utilizados produtos aerossóis (spray) ou onde esteja a ser administrado oxigénio.
- Nunca utilize sobre uma superfície macia, como uma cama ou sofá, onde as aberturas de ar possam ficar bloqueadas.
- Não utilize o dispositivo próximo de roupas largas ou joias.
- Mantenha o cabelo comprido afastado do dispositivo durante a utilização.
- A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Não remova os parafusos nem tente desmontar.
- Não utilize continuamente durante mais de uma hora. Após uma hora de utilização, deixe o dispositivo repousar durante 30 minutos antes de o voltar a utilizar.
- Retire o dispositivo da tomada após o carregamento ou antes de o utilizar.
- Utilize o dispositivo apenas de acordo com as instruções de funcionamento.
- Quando utilizar o Hypervolt 2 Pro, faça-o apenas em superfícies secas e limpas do corpo, pressionando ligeiramente e deslocando-o pelo corpo, demorando cerca de sessenta (60) segundos em cada zona. O Hypervolt 2 Pro deve ser utilizado apenas em áreas corporais de tecido mole e não deve ser utilizado em áreas rígidas ou ósseas do corpo, incluindo a cabeça. Se sentir dor ou desconforto, para além de dor muscular ligeira, deixe imediatamente de utilizar o Hypervolt 2 Pro. Podem ocorrer equimoses devido à utilização do Hypervolt 2 Pro, independentemente da pressão definida. Caso ocorram equimoses, não deverá utilizar o Hypervolt 2 Pro na área afetada até que a equimose tenha desaparecido completamente. A utilização do Hypervolt 2 Pro deve também ser evitada em todo o tipo de equimoses, contusões, erupções cutâneas ou áreas irritadas ou lesionadas da pele até que estas estejam completamente saradas. Quando utilizar o Hypervolt 2 Pro, certifique-se de que mantém os dedos das mãos, os dedos dos pés, o cabelo e outras partes do corpo afastados da parte de trás do acessório de modo a evitar entalamentos ou que o cabelo fique emaranhado.

O Hypervolt 2 Pro apenas deve ser carregado com o carregador Hyperice de 18VCC com isolamento duplo (número de modelo MX24Z2-1801000) fornecido com o dispositivo. Não carregue o Hypervolt 2 Pro durante a noite nem deixe o Hypervolt 2 Pro sem vigilância quando este estiver a carregar ou a ser utilizado.

Não utilize o Hypervolt 2 Pro ou qualquer outro dispositivo de percussão sem obter primeiro a aprovação do seu médico caso se aplique alguma das seguintes condições:

- Gravidez, diabetes com complicações como neuropatia ou danos na retina, utilização de pacemakers, cirurgia ou ferimento recente, epilepsia ou enxaquecas, hérnia discal, espondilolistese, espondilólise ou espondilose, substituições recentes das articulações ou DIU, pinos ou placas metálicas ou quaisquer preocupações com a sua saúde física. As crianças e os indivíduos debilitados deverão ser acompanhados por um adulto aquando da utilização de um dispositivo de percussão ou vibração. Estas contra-indicações não significam que não pode utilizar um dispositivo de percussão ou vibração. No entanto, aconselhamos que consulte o seu médico antes o fazer. Encontra-se em curso uma investigação sobre os efeitos da massagem de percussão em condições médicas específicas, o que pode resultar na redução da lista de contra-indicações acima indicada.

O Hypervolt 2 Pro contém uma bateria que deve ser eliminada em segurança num centro de eliminação ou reciclagem de resíduos eletrónicos adequado.

ADVERTÊNCIA

A bateria utilizada neste dispositivo pode apresentar um risco de incêndio ou de queimaduras químicas se for utilizada incorretamente. Não desmonte, aqueça acima de 100 °C ou incinere. Elimine a bateria usada imediatamente. Mantenha-a afastada das crianças.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

O Hypervolt 2 Pro é um dispositivo de massagem de percussão portátil que fornece impulsos direcionados de pressão para cuidar dos músculos, aliviar a tensão, proporcionar uma massagem relaxante, acelerar o aquecimento e a recuperação e ajudar a manter a flexibilidade e a amplitude de movimentos.

FUNCIONAMENTO

Coloque o Hypervolt 2 Pro na posição ON (ligado) na base da pega. A luz LED na pega acende-se, indicando o nível da bateria. Rode o controlo digital no sentido dos ponteiros do relógio para a definição de velocidade pretendida, indicada pelas luzes LED que se acendem na face do painel de controlo. O Hypervolt 2 Pro está agora pronto para ser utilizado. A velocidade mais baixa corresponde à posição das nove horas e a velocidade mais alta à posição das doze horas. Se rodar o controlo no sentido dos ponteiros do relógio, aumenta a velocidade. Para desligar a percussão, rode o controlo digital no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até os cinco LED se desligarem.

MUDAR ACESSÓRIOS DA CABEÇA

Mude os acessórios apenas depois de desligar a definição de velocidade e de a cabeça deixar de se mover. Para mudar acessórios da cabeça, puxe a cabeça existente para fora para a remover e insira a cabeça pretendida diretamente na abertura enquanto empurra firmemente. Para a cabeça de forquilha, alinhe a patilha na forquilha com a ranhura na abertura e empurre com firmeza.

CARREGAMENTO


Carregue totalmente a bateria até quatro horas antes da primeira utilização com a bateria fixa ao dispositivo ou separada do mesmo. Para carregar, ligue a extremidade CC do carregador de 18 V fornecido à porta de carregamento na parte inferior da bateria/pega e ligue o carregador a uma tomada de parede. As cores da faixa de luz LED correspondem ao nível de carga, de vermelho (baixo) a verde (totalmente carregada). A carga total é indicada quando a luz LED permanece verde e totalmente iluminada. A bateria pode ser recarregada a qualquer altura e com qualquer nível da bateria. Não se recomenda que a bateria fique completamente descarregada até ao nível do LED vermelho. O tempo de funcionamento médio é superior a 2 horas, dependendo do nível de velocidade e da pressão aplicada durante a utilização. Recomenda-se que o interruptor de alimentação seja colocado na posição OFF (desligado) quando o dispositivo não estiver a ser utilizado ou durante o armazenamento e transporte.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Certifique-se de que a energia está desligada e de que o carregador da bateria não está colocado. Utilize um pano humedecido e limpo e limpe cuidadosamente o Hypervolt 2 Pro. Guarde num local limpo, seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta, quando não estiver a ser utilizado.

LIGAÇÃO À APLICAÇÃO HYPERICE

Para ligar o dispositivo à aplicação Hyperice através de Bluetooth®, certifique-se de que o dispositivo está ligado, de que o Bluetooth® está ativado no seu telefone e de que o dispositivo está próximo. Selecione uma rotina na aplicação Hyperice e, se solicitado, toque em "Scan for Devices" (Procurar dispositivos). Selecione o seu dispositivo quando este aparecer no ecrã. O HyperSmart™ inicia automaticamente o dispositivo e ajusta a velocidade e a intensidade à medida que realiza a rotina.

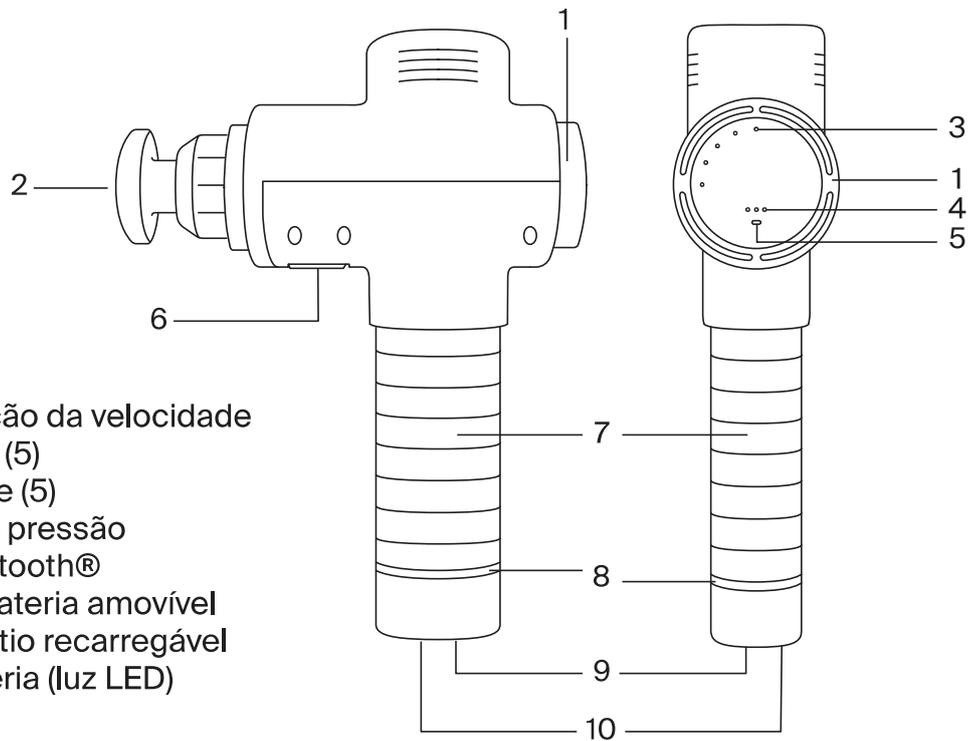

ESPECIFICAÇÕES

1. Controlo digital de definição da velocidade
2. Cabeças intercambiáveis (5)
3. Indicadores de velocidade (5)
4. Indicadores do sensor de pressão
5. Indicador de ligação Bluetooth®
6. Patilha de libertação da bateria amovível
7. Pega/bateria de íões de lítio recarregável
8. Indicador do nível da bateria (luz LED)
9. Interruptor ON/OFF
10. Porta de carregamento

Carregador CA/CC: 100-240V - 50/60Hz 0,7A - 18V 1A 18W

Bateria de íões de lítio recarregável de 4100 mAh

Frequência: Nível 1 – 1700/28Hz, nível 2 – 1900/32Hz, nível 3 – 2100/35Hz,
nível 4 – 2400/40Hz, nível 5 – 2700/45Hz

Peso: 1,18kg/2,26lbs

Concebido nos EUA. Montado na China.

GARANTIA

Se, no prazo de dois anos a partir da data de compra, este dispositivo falhar devido a um defeito de material ou mão de obra, a Hyperice Inc. irá reparar ou substituir gratuitamente o dispositivo ou os componentes necessários.

Esta garantia exclui:

- a) danos causados por acidente, abuso, manuseamento indevido ou transporte;
- b) dispositivos sujeitos a reparação não autorizada;
- c) dispositivos não utilizados de acordo com as instruções de cuidados da Hyperice;
- d) danos que excedam o custo do dispositivo;
- e) deterioração do dispositivo fornecido resultante de condições anormais de armazenamento e/ou de salvaguarda nas instalações do cliente; e
- f) falta de apresentação do comprovativo de compra datado.

Alguns estados e países não permitem uma limitação de danos, pelo que a limitação acima pode não se aplicar a si. Esta garantia abrange direitos jurídicos específicos, mas outros direitos podem variar consoante o país e o estado. Este serviço de garantia está disponível através das políticas e procedimentos operacionais da Hyperice, Inc. e de todos os distribuidores internacionais da Hyperice. Se for cliente, contacte a entidade empresarial, o distribuidor ou o revendedor Hyperice adequado a quem comprou diretamente o dispositivo para obter os procedimentos de garantia e autorização de devolução. Esta garantia é iniciada e executada pela Hyperice, Inc.